

歯科材料 06 歯科用印象材料
歯肉圧排糸 35861001
一般医療機器

TDゼット・コード

【形状、構造及び原理】

【概要】

本品は塩化アルミニウム、塩化セチルピリジニウムを含有し、浸出液等を速やかに吸収させる青緑色綿糸である。

【形状、構造】

本品の形状は、日本工業規格20番手を使用した6本撚りまたは4本撚りである。

【原理】

本品の綿糸を歯肉嚢内に挿入することによって、印象採得の作業を容易にするため、また歯肉に損傷を与えないために、一時的にその部位の歯肉を歯面から排除する。

【使用目的、効能又は効果】

印象採得のために行う歯肉圧排時に用いる。

【効能又は効果に関する使用上の注意】

本品は、吸湿性を有するため、使用後は速やかにキャップを確実に締めて保管すること。キャップを外したまま放置すると水の吸収速度及び綿糸の強度が低下します。

【品目仕様等】

【性能】

水の吸収速度

本品5gを、水面上約10mmの高さから静かに落とすとき、8秒以内に水面下に沈む。

【操作方法又は使用方法等】

目的部位の歯肉嚢内へ必要な長さに切った本品を挿入する。

【使用上の注意】

【使用注意】

- ①開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- ②本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ③歯科医療有資格者以外は、本品を使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

【貯蔵・保管方法】

- ・しゃ光気密容器に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

TDゼット・コード（M：6本撚り）：200cm/瓶

TDゼット・コード（S：4本撚り）：200cm/瓶

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元 福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824
TEL 0748-52-2323

発売元 株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
大阪市東淀川区西淡路5-20-19
TEL 06-6370-4182