

ポリッシングペースト

## POLISHING PASTE

1号



PMTC用として

仕上げ用に

ファイン  
Fine  
FINE

3号



PMTC用として

研磨用に

ハード  
Hard  
HARD

フルーツミックスミントフレーバー

- ◎フッ素 900ppm 配合で歯質強化が期待できます。
- ◎ラミネートチューブ入りのため乾燥しにくく、必要量だけ取り出せます。
- ◎スクレーリング、ルートプレーニング後の歯面研磨に。
- ◎歯冠部の着色除去に。

ポリッシングペースト 1号	製品名	ポリッシングペースト 3号
7.8 $\mu$ m	研磨材平均粒子径	50.8 $\mu$ m
プロピレングリコール、パラベン、黄色4号、香料	指定成分	プロピレングリコール、パラベン、青色1号、香料
100g 中 フッ化ナトリウム 0.1989g	有効成分	100g 中 フッ化ナトリウム 0.1989g
歯を白くする。う蝕の発生及び進行の予防	効能・効果	歯を白くする。う蝕の発生及び進行の予防
レモンイエロー/フルーツミックスミント	性状（色/風味）	ブルーグリーン/フルーツミックスミント
30mL	容量	30mL

フッ化ナトリウム配合医薬部外品歯磨類  
ポリッシングペースト1号(ファイン)  
3号(ハード)


ポリッシングペーストは、効率のよい研磨剤とフッ化ナトリウムを配合し、研磨剤の粒度の異なる2種類のペーストを使い分けて歯を磨き上げることにより、歯の審美性の向上と積極的なむし歯予防を行う、プロフェッショナル用に適した歯磨剤です。

フッ素 900ppm 配合で歯質の強化、操作性にも優れたペーストです

研磨剤は “ケイソウ土”



- ◎ ラミネートチューブ入で乾燥しにくく、使いやすい。
- ◎ 粘着性を付与しているため使用中にペーストが飛散しにくく、歯面への付着性や拡がり良好です。
- ◎ 洗浄性をそこなわない適度な流動性を有しています。
- ◎ フッ素900ppm配合で歯質強化が期待できます。

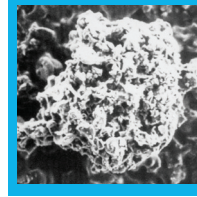


「ポリシングペースト」の研磨剤 “ケイソウ土”

ポリシングペーストの研磨剤は珪藻土（ケイソウ土）。珪藻の化石からなる堆積岩で、その粒子は丸みを帯びており歯面を傷つけにくく、より滑らかに磨き上げることができます。

## ポリシングペーストのプラーク付着抑制効果

出典：鈴木克政ら：研磨ペーストを用いたプラーク付着抑制効果について、小児歯科学雑誌 38巻・3号

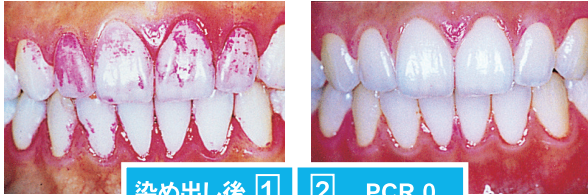

1 染め出し後  
2 PCR 0  
3 ポリシング  
4 24時間後

### 1 染め出し後 2 PCR 0

被験者：歯科衛生士実習生 32名  
歯垢染色剤にて染め出し、完全にプラークを除去し、この状態を「PCR 0」とした。なお、各部位の評価はO' Leary等のプラークコントロールレコード算出法に準じた。

3 ポリシング 次に、左右どちらか片側をポリシングペースト1号及び、3号を用いて歯面研磨を行い、24時間いっさいの口腔清掃を禁止した。なお、日常の食生活に関しては規制しなかった。

### 4 24時間後

24時間後に再び全顎を歯垢染色しプラークコントロールレコードを算出した。結果この例では、左側をポリシングペーストにて研磨したが、24時間経過後においてもほとんど歯垢付着が見られなかった。以上のように、ポリシングペーストによる処理により、未研磨の部位と比較して、有意にその後のプラーク付着が抑制されることが示唆された。

片顎だけ  
ポリシング




## ※1 プラークは病原性バイオフィーム

※1：クインテッセンス出版「歯科衛生士」2003.Vol.27 P.58-2より

う蝕および、歯周病疾患の予防にはプラークの除去がきわめて重要ですが、このう蝕の発現には非水溶性バリアーである不溶性グルカンが大きく関与しています。このグルカンバリアーを持つアクティブなプラーク（病原性バイオフィーム）は通常のブラッシングだけでは十分な除去ができません。そこで、より入念な professional mechanical tooth cleaning = PMTC が重要となってきます。

※2 出典：鈴木克政ら：研磨ペーストを用いたプラーク付着抑制効果について、小児歯科学雑誌 38巻・3号

## PMTC による物理的・機械的な除去が必要です

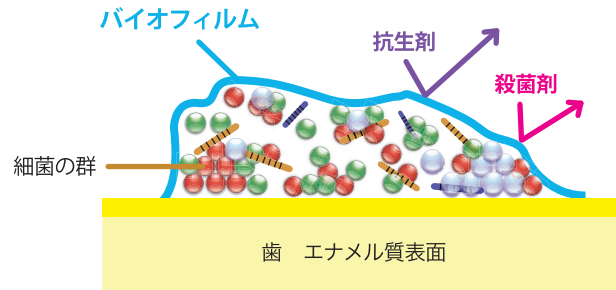

## ビーブランド製品のオーラルケアシステム

Pro Care



医薬部外品歯磨類  
ポリシングペースト1号・3号

Home Care



フッ化物配合歯磨剤  
キャナリーナ 100SY・SC・SR

Home Care



フッ化物配合歯磨剤  
キャナリーナ 900Pw

Pro Care



フッ化物歯面塗布剤  
フルオール・ゼリー歯科用2%

Home Care



フッ化物洗口剤  
ミラノール顆粒11%

製造発売元/福地製薬株式会社 滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

製造発売元/東洋製薬化成株式会社 大阪市鶴見区鶴見2丁目5番4号

[発売元]

(株)ビーブランド・メディコーデンタル

大阪営業所：大阪市東淀川区西淡路5-20-19  
TEL:06-6370-4182 FAX:06-6370-4184

東京営業所：東京都千代田区神田錦町1-14  
TEL:03-3295-6926 FAX:03-3295-6927

[製造販売元]

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻 824  
TEL:0748-52-2323