

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯肉圧排糸 35861001

TDZ・コード

【形状・構造及び原理等】

【概要】

本品は塩化アルミニウム、塩化セチルピリジニウムを含有し、
浸出液等を速やかに吸収させる青緑色綿糸である。

【形状・構造】

本品の形状は、日本工業規格 20 番手を使用した 6 本撚りまたは 4 本撚りである。

【原理】

本品の綿糸を歯肉嚢内に挿入することによって、印象採得の作業を容易にするため、
また歯肉に損傷を与えないために、一時的にその部位の歯肉を歯面から排除する。

【使用目的又は効果】

印象採得のために行う歯肉圧排時に用いる。

【効能又は効果に関する使用上の注意】

本品は、吸湿性を有するため、使用後は速やかにキャップを確実に締めて保管すること。
キャップを外したまま放置すると水の吸収速度及び綿糸の強度が低下する。

【使用方法等】

目的部位の歯肉嚢内へ必要な長さに切った本品を挿入する。

【使用上の注意】

歯科用にのみ使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

遮光気密容器で室温保管すること。
歯科従事者以外が触れないよう適切に保管・管理をすること。

【包装】

TDZ・コード（M：6 本撚り）：200 cm/瓶

TDZ・コード（S：4 本撚り）：200 cm/瓶

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
大阪市東淀川区西淡路 5-20-19
TEL 06-6370-4182 FAX 06-6370-4184