

歯科材料 04 歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填シーラ （コード：36095000）

キャナリスタ

【禁忌・禁止】

本材の成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本材は、下記品目より構成される。

品目名	形状	成分
散	粉末	酸化亜鉛、ロジン、硫酸バリウム
液	液体	チョウジ油、脂肪酸


本品は、散及び液からなり、それらを練和するとき、散含有成分と液含有成分のキレート反応により硬化する。

【使用目的又は効果】

抜髄後あるいは感染根管治療後の根管充填に用いる。

【使用方法等】

通常、液：1滴（約0.03mL）に対して散：約0.06～0.09g（下図参照）の割合で採取・練和し、ペースト状として用いる。なお、液と散の配合比は適宜増減できる。

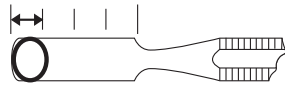

例）幅6mmのスパチュラ1/4に小さい山ができる量

【操作可能時間】

ペーストは練和後、約20～30分間の操作可能時間を有する。
※夏期や高温多湿の環境下では、操作可能時間が短くなることがある。

【使用方法】

- 練和操作
本剤を適量、練板上にとり、スパチュラを使用して約1分間で均一に練和する。
- 根管の清掃
通法により根管内の洗浄を行い、ペーパーポイント等を用いて根管内を十分乾燥させる。
- ポイントの挿入
試適しておいたマスターポイントの根尖側半分の本剤を塗布し、根管内にて静かに上下運動をさせながら、根尖部を完全に満たし、同時に本剤の空気を抜き、所定の位置まで挿入する。
- 充填操作
レントロに少量の本剤をつけ、根管内に挿入してから低速で回転を始め、根管壁に本剤を塗布する。レントロを引き出す際には、軽く壁に押し付けながら引き出す。太い根管では本剤を塗布したアクセサリポイントを使用し、スプレッダーにより形成した空隙に挿入していく。
※根管充填の際には、本品を根尖外に溢出させないように注意して充填する。
- 仕上げ操作
加熱したエキスカパーター等を使用して根管口付近で余分なガッターチャポイントを切除し、根管ブラガーを使用して根尖方向へ加圧する。また、余剰の本剤はアルコール綿で拭き取る。
※本品はX線造影性を有する。
※根管内の硬化物は、根管充填材用軟化材で軟化でき、撤去することができる。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ①本材の「散」には必ず本材の「液」を使用すること。
- ②使用后、器具等に付着した本材は、硬化しないうちにアルコール綿などで拭き取ること。
- ③本材は、[使用目的又は効果]の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ①本材の使用により、発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ②本材が口腔軟組織や皮膚に付着したり、目に入らないように注意すること。付着した場合には、すぐに大量の流水で洗浄すること。また、目に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本材は、光を避けて室温で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【有効期間】

本品の有効期間は3年とする。

[自己認証（当社データ）による。]

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 ビーブランド・メディコーデンタル
住所：〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号
電話番号：06-6370-4182 FAX：06-6370-4184