

はキレイですか？

入れ歯にはバイ菌がいっぱい!?

入れ歯に付いた汚れを放っておくと、



- ・入れ歯の変色
- ・義歯性口内炎
- ・口腔カンジダ症
- ・口臭 など

いろいろなお口のトラブルの
原因にもなります。

入れ歯の一般的な材料である
レジンには菌がくっつきやすいため、

毎日の清掃で清潔に 保つことが大切です。

そんな入れ歯の洗浄方法を
詳しくチェック！

開く



デントムース



内容量
300mL

デントムース 詰め替え用 ボトル



内容量
300mL

使用上の注意

口や目には入れないでください。用途以外には使用しないでください。万一 飲み込んだり、目に入ってしまった時はすぐに流水で洗い、医師にご相談ください。直射日光の当たる場所、高温になる場所には置かず、室温で保管してください。温度の高い所に置いた場合、液が黄色く色づくことがあります。品質に問題はございません。寒い時期には成分が析出することがありますが、室温に戻すと溶解します。



(株)ビーブランド・メディコーデンタル

本社：大阪市東淀川区西淡路5-20-19 | 東京営業所：東京都千代田区神田錦町1-14
TEL: 06-6370-4182 FAX: 06-6370-4184 | TEL: 03-3295-6926 FAX: 03-3295-6927
<http://www.bee.co.jp/>

作成日：2020.3

医院用リーフレット

いつまでも元気にずっと美味しく

矯正装置・マウスガード・義歯用除菌洗浄剤

デントムース

泡で手軽に
毎日よごれリセット



詰め替え用
リニューアル

パーシャルデンチャー、フルデンチャー、
マウスガード、ナイトガード、矯正用リテーナー、
ノンクラスプデンチャー、ブリーチングトレイ、
床拡大装置等の洗浄にお使いいただけます。



あなたの入れ歯はキレイですか？

こんなの欲しかった！
詰替用あります。



どうして入れ歯を洗わないといけないの？



入れ歯やマウスガードに付着した菌を除菌！ 泡で手軽に「デントムース」で毎日よごれリセット！

ブラッシング

+

入れ歯洗浄剤

ブラッシングだけ、入れ歯洗浄剤だけでは落としきれない汚れも
デントムースを使えば一度で解決！

今すぐチェック！

当てはまる人にはデントムースがオススメ！

- | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| ☐ 洗浄に時間をかけたくない | ☐ 毎食後、入れ歯を洗いたい | ☐ しっかり除菌したい |
| ☐ 部分入れ歯を使っている | ☐ マウスガードを使用している | ☐ ニオイが気になる |
| ☐ 入れ歯に優しいものがない | ☐ 入れ歯の汚れが気になる | ☐ 無香料がいい |

口腔カンジダ症って？

お口の乾燥、入れ歯の清掃不足などによって引き起こされることがある感染症です。痛みで噛めなくなることもあります。

急性偽膜性カンジダ症

舌やお口の粘膜の表面に白いコケ状のものができます。進行すると炎症が起きて治りにくくなります。




紅斑性カンジダ症

白いコケ状のものがとれたあとや入れ歯下の粘膜に赤い斑点や腫れがある状態で、痛みが強い場合があります。



慢性肥厚性カンジダ症

偽膜性カンジダ症が長期間続き、炎症によって粘膜が厚くなります。進行すると皮膚のように硬くなります。

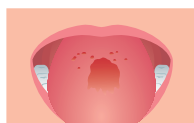

カンジダ性口角炎

口角周辺に、ただれや亀裂ができます。



最短 30 秒で除菌

短時間で洗浄できて毎食後にも使いやすい！

タバコやニもスッキリ落ちる！

歯石防止成分配合

入れ歯の表面をツルツルにキープ！

無香料

香りでごまかさない



←洗浄前 洗浄後→

使用方法

*汚れがひどい時は泡をかけて3～5分放置してから磨いていただくとより効果的です。

入れ歯を軽く
水洗いする。



適量 (1～2 プッシュ)
を義歯にかける。



ブラシ等を用いて
全体を磨く。(約 30 秒間)



しっかりと
流水ですすぐ。

