

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯面研磨材 70904000

医療機器届出番号  
27B2X00325000002

医療関係者用  
医療機器届出番号  
27B2X00325000002

一般医療機器

# ポリッシングペースト 1step F

2021年5月改訂(第1版)の製品電子添文に基づき作成

<b>禁忌・禁止</b>	<b>保管方法及び有効期間等</b>				
本材又は本材に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎、腫脹、かゆみ等の過敏症状の既往歴のある患者には使用しないこと。	1. 貯蔵・保管方法 (1) 高温多湿及び直射日光を避け、室温(1℃～30℃)で保管すること。 (2) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。 2. 有効期間 外箱に表示 [記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。]				
<b>形状・構造及び原理等</b>	<b>製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等</b>				
<table border="1"><thead><tr><th>形状</th><th>成分</th></tr></thead><tbody><tr><td>淡青色のペースト状</td><td>無水ケイ酸、リン酸三カルシウム、ケイソウ土、フッ化ナトリウム、ソルビトール、濃グリセリン、プロピレングリコール、L-メントール、着色料、香料、精製水</td></tr></tbody></table> <p>原理：研磨成分(無水ケイ酸、リン酸三カルシウム、ケイソウ土)により、歯面を物理的に清掃研磨する。</p>	形状	成分	淡青色のペースト状	無水ケイ酸、リン酸三カルシウム、ケイソウ土、フッ化ナトリウム、ソルビトール、濃グリセリン、プロピレングリコール、L-メントール、着色料、香料、精製水	製造販売元 株式会社ビーブランド・メディコーデンタル 住所：大阪府大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号 TEL：06-6370-4182 FAX：06-6370-4184 https://bee.co.jp/
形状	成分				
淡青色のペースト状	無水ケイ酸、リン酸三カルシウム、ケイソウ土、フッ化ナトリウム、ソルビトール、濃グリセリン、プロピレングリコール、L-メントール、着色料、香料、精製水				
<b>使用目的又は効果</b>	<b>GS1 コード(個包装)</b>				
歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。	 (01)04987463220304				
<b>使用方法等</b>					
本材の適量をブラシ又はカップ等に取り、歯面を清掃又は研磨する。処理後、口腔内を洗浄し本材を除去する。 [使用方法に関連する使用上の注意] 1. ハンドピースは、高速回転で使用すると研磨材が飛び散ることがあるので、低速回転(1500rpm以下)で使用する。 2. ハンドピースは、メーカーの指示に従って使用すること。 3. 本材を使用して歯面を清掃又は研磨する際には、眼に入るのを防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。 4. 本材を使用して歯面を清掃又は研磨する際は、衣服等への飛散を防ぐために患者にエプロン等を使用すること。 5. 歯面の汚れがひどい場合は、あらかじめスケーラーや粗研磨用歯面研磨材等で除去してから使用すること。	参考医院価格(税別)：2,900円/本 容量：80g				
<b>使用上の注意</b>					
1. 重要な基本的注意 (1) 本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診療を受けさせるなど適切な処置を行うこと。 (2) 本材の使用時は、目の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。 (3) 本材が眼に入った場合は、すぐに水で十分に洗浄し、眼科医の診療を受けさせるなど適切な処置を行うこと。 (4) 本材は乾燥すると残渣が落ちにくい場合があるので、使用後は速やかに洗浄すること。					

増粘剤無配合・微細な研磨粒子で  
“歯面にやさしい”清掃を



PTC&PMTTC 用歯面研磨材

POLISHING PASTE 1STEP F  
ポリッシングペースト

- その他、詳細は製品電子添文をご参照ください。
- 製品電子添文の改訂に十分ご注意ください。

■お取引材料店名

製造販売元 資料請求先

**Bee (株)ビーブランド・メディコーデンタル**  
本 社：大阪市東淀川区西淡路5-20-19  
TEL: 06-6370-4182 FAX: 06-6370-4184

東京営業所：東京都千代田区神田錦町1-14  
TEL: 03-3295-6926 FAX: 03-3295-6927

問い合わせ先 ☎ 03-3295-6926  
土・日・祝日を除く 9:00～12:00  
13:00～17:00

弊社ホームページはこちら



https://bee.co.jp/

1E004A308 作成年月：2025年2月

**Bee BEE BRAND  
MEDICO DENTAL**



ポリッシングペースト  
POLISHING PASTE  
1STEP F



ワンステップ



ソーダ風味



歯面にやさしい

粗研磨から仕上げ磨きまで、ワンステップで



フッ化物 1,450ppm 配合  
シャンペンソーダ風味  
容量 80g

歯面をやさしく清掃します

粒子の細かい研磨材を使用しています。 ※1: 無水ケイ酸、ケイソウ土、リン酸三カルシウム

使用方法



適量をブラシ、  
又はカップ等取る。



歯面を清掃、  
又は研磨する。



口腔内を洗浄する。



フロス、歯間ブラシに  
付けても使用できます


使用例

フルオール・ゼリー歯科用 2%、フルオール液歯科用 2%、サハライド液歯科用 38% の塗布前


ステイン・歯石除去後やスクレーリング後

歯面を傷つけにくい

ステンレス板における  
研磨前後の粗さ試験結果

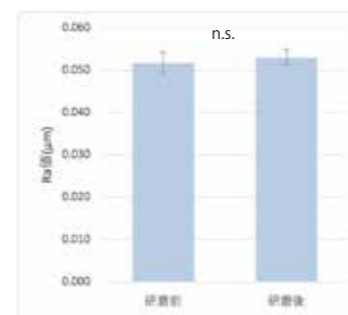


アバタイトレットにおける  
研磨前後の粗さ試験結果

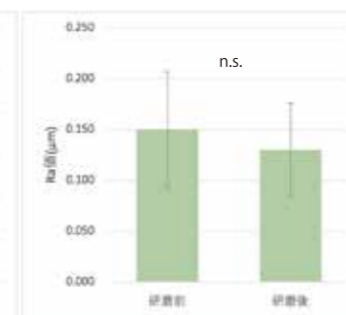

傷ついた歯面を滑らかに

粗面化ステンレス板における研磨前後の粗さ試験結果

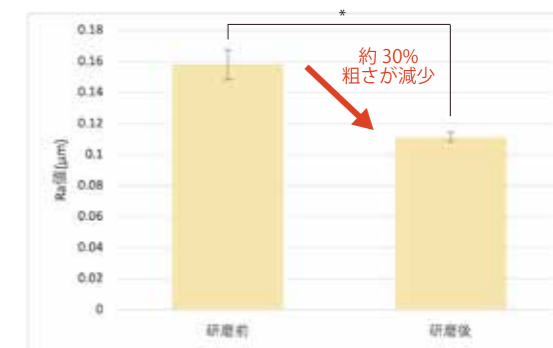

増粘剤不使用のため、  
研磨成分がダイレクトに歯面を清掃

人工ブラークを付着させたアバタイトレットに対する清掃効果



\* 歯面の状態により、効果が異なる場合があります。  
実験の詳細は、弊社 web サイト (bee.co.jp) をご参照ください。

サハライド液歯科用 38% を固着させたアバタイトレットに対する清掃効果

