

ミラノール専用溶解瓶(200mL)

計量カップ 1~15mL 目盛付

計量カップ



最大容量
200mL



容量: 200mL
サイズ: 横 48mm / 奥 56mm / 高さ 140mm / 重量 26g | 包装: 10 本入

ミラノール専用溶解瓶(200mL)を使用した洗口液の作り方



1 1g分包(黄色)
または
1.8g分包(ピンク)

2 100mLまたは200mL
の水で溶解する

3 かるく振って
溶かす

■ 調製の目安


ミラノール顆粒 11%の量	水の量	フッ化物イオン濃度	人数目安	
			10mL	5mL
1g × 1包	200mL	250ppmF(毎日法)	20人	40人
1.8g × 1包		450ppmF(毎日法)	20人	40人
1.8g × 1包	100mL	900ppmF(週1回法)	10人	20人
1.8g × 2包	200mL		20人	40人

ミラノール[®]顆粒11% 溶解瓶

ミラノールを溶かすための専用容器

集団洗口溶解瓶S(800mL)

1プッシュ約5mLのポンプ式

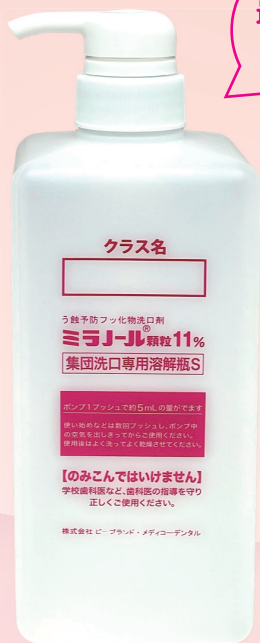

最大容量
800mL

- 最大160人分調製可能。(5mL使用時)
- 角形で保管時にかさばらない。
- 残量確認用の目盛り付き。
- ジョイントゴムで1プッシュ約3.5mLに調節可能。別途ご用意ください。



※残量が50mL以下になりますと
ポンプでの分注は難しくなります。

容量: 800mL
サイズ: 縦 78mm / 横 78mm / 高さ 210mm / 重量 94g | 包装: 1 本入

集団洗口溶解瓶S(800mL)を使用した洗口液の作り方



1 ミラノール顆粒
を入れる

2 任意の水量で
溶解する

3 かるく振って
溶かす

■ 調製の目安

ミラノール顆粒 11%の	水の量	フッ化物イオン濃度	人数目安	
			10mL	5mL
1g × 2包	400mL	250ppmF(毎日法)	40人	80人
1g × 3包	600mL		60人	120人
1g × 4包	800mL		80人	160人
1.8g × 2包	400mL	450ppmF(毎日法)	40人	80人
1.8g × 3包	600mL		60人	120人
1.8g × 3包	300mL		30人	60人
1.8g × 4包	400mL	900ppmF(週1回法)	40人	80人
1.8g × 5包	500mL		50人	100人
1.8g × 6包	600mL		60人	120人
1.8g × 7包	700mL		70人	140人
1.8g × 8包	800mL		80人	160人



資料請求先
株式会社 ビーブランド・メディコーデンタル

くすりに関するご相談は「医療情報推進部」まで。

☎(03) 3295-6926
土・日・祝を除く 9:00~17:00

弊社ホームページ

