

ポリッシングペースト 1step F ポリッシングペースト 1step N

禁忌・禁止	本材又は本材に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎、腫脹、かゆみ等の過敏症状の既往歴のある患者には使用しないこと。
医療機器届出番号	F：27B2X00325000002 N：27B2X00325000003
クラス分類	一般医療機器
類別	歯科材料 09 歯科用研削材料
一般名称	歯面研磨材
商品名	F：ポリッシングペースト 1step F N：ポリッシングペースト 1step N
形状	F：淡青色のペースト状 N：白色のペースト状
原理	研磨成分（無水ケイ酸、リン酸三カルシウム、ケイソウ土）により、歯面を物理的に清掃研磨する。
成分	F：無水ケイ酸、リン酸三カルシウム、ケイソウ土、フッ化ナトリウム、ソルビトール、濃グリセリン、プロピレングリコール、トメントール、着色料、香料、精製水 N：無水ケイ酸、リン酸三カルシウム、ケイソウ土、ソルビトール、濃グリセリン、プロピレングリコール、トメントール、香料、精製水
使用目的又は効果	歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。
使用方法等	本材の適量をブラシ又はカップ等に取り、歯面を清掃又は研磨する。処理後、口腔内を洗浄し本材を除去する。 [使用方法に関連する使用上の注意] 1. ハンドピースは、高速回転で使用すると研磨材が飛び散ることがあるので、低速回転（1500rpm以下）で使用すること。 2. ハンドピースは、メーカーの指示に従って使用すること。 3. 本材を使用して歯面を清掃又は研磨する際には、眼に入るのを防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。 4. 本材を使用して歯面を清掃又は研磨する際は、衣服等への飛散を防ぐために患者にエプロン等を使用すること。 5. 歯面の汚れがひどい場合は、あらかじめスクレーパーや粗研磨用歯面研磨材等で除去してから使用すること。

使用上の注意	<p>1. 重要な基本的注意</p> <p>(1) 本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診療を受けさせるなど適切な処置を行うこと。</p> <p>(2) 本材の使用時は、目の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡などを使用すること。</p> <p>(3) 本材が眼に入った場合は、すぐに水で十分に洗浄し、眼科医の診療を受けさせるなど適切な処置を行うこと。</p> <p>(4) 本材は乾燥すると残渣が落ちにくい場合があるので、使用後は速やかに洗浄すること。</p>
保管方法及び有効期間等	<p>1. 貯蔵・保管方法</p> <p>(1) 高温多湿及び直射日光を避け、室温（1℃～30℃）で保管すること。</p> <p>(2) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。</p> <p>2. 有効期間</p> <p>外箱に表示 [記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。]</p>

添付文書第1版をもとに作成
添付文書の改訂に留意すること



容量：80g



<https://bee.co.jp>

製品情報は
弊社ホームページまで

お取引先材料店

製造販売元



(株) ビーブランド・メディコーデンタル

本社：大阪市東淀川区西淡路 5-20-19
TEL：06-6370-4182 FAX：06-6370-4184
東京営業所：東京都千代田区神田錦町 1-14
TEL：03-3295-6926 FAX：03-3295-6927

増粘剤無配合・微細な研磨粒子で
“歯面にやさしい” 清掃を



PTC&PMTc 用歯面研磨材

POLISHING PASTE 1STEP F & N
ポリッシングペースト



ポリッシングペースト POLISHING PASTE 1STEP



ワンステップ ソーダ風味 歯面にやさしい

粗研磨から仕上げ磨きまで、ワンステップで



フッ化物 1,450ppm 配合
シャンペンソーダ風味
容量 80g

フッ化物無配合・無着色
クリアソーダ風味
容量 80g

歯面をやさしく清掃します

※1
粒子の細かい研磨材を使用しています。 ※1：無水ケイ酸、ケイソウ土、リン酸三カルシウム

使用方法



適量をブラシ、
又はカップ等に取り。

歯面を清掃、
又は研磨する。

口腔内を洗浄する。



フロス、歯間ブラシに
付けても使用できます

使用例

フルオール・ゼリー歯科用 2%、フルオール液歯科用 2%、サホライド液歯科用 38% の塗布前

ステイン・歯石除去後やスクレーリング後

ホワイトニング処置前

歯列矯正用ブラケット装着前


フッ化物無配合・着色剤不使用

エッチング処置前


フィッシャーシーラント処置前

N がオススメ!

歯面を傷つけにくい

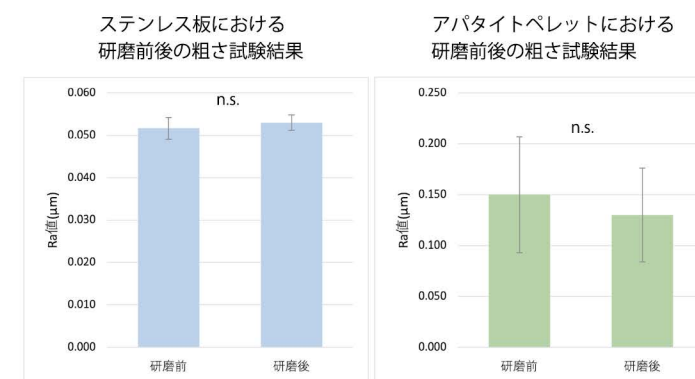

傷ついた歯面を滑らかに

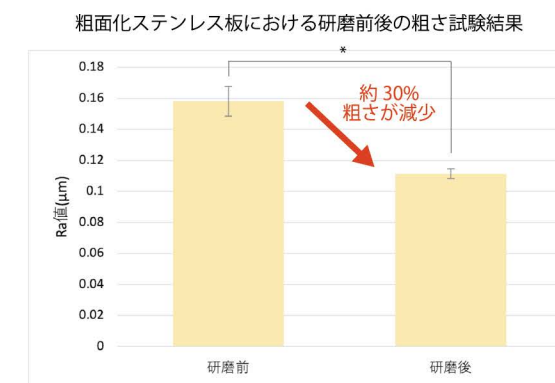

増粘剤不使用のため、 研磨成分がダイレクトに歯面を清掃

人工ブラークを付着させたアパタイトペレットに対する清掃効果



* 歯面の状態により、効果が異なる場合があります。実験の詳細は、弊社 web サイト (bee.co.jp) をご参照ください。

サホライド液歯科用 38% を固着させたアパタイトペレットに対する清掃効果

