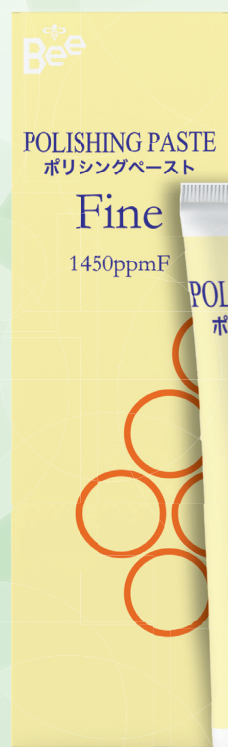


医療機器届出番号	
Fine	27B2X00325000005
Coarse	27B2X00325000006

新発売

New

ポリッシングペースト POLISHING PASTE

ファイン
FinePMTC用として
仕上げ用にコース
CoarsePMTC用として
研磨用に

フルーツミックスミントフレーバー

- ◎フッ素として1450ppm配合です。
- ◎ラミネートチューブ入りのため乾燥しにくく、必要量だけ取り出せます。
- ◎スクレーリング、ルートプレーニング後の歯面研磨に。
- ◎歯冠部の着色除去に。



製品名	ポリッシングペースト Fine
フッ素濃度	1450ppm
香り	フルーツミックスミント
容量	35g
参考医院価格	¥1,300 (税別)

製品名	ポリッシングペースト Coarse
フッ素濃度	1450ppm
香り	フルーツミックスミント
容量	35g
参考医院価格	¥1,300 (税別)

研磨基剤はケイソウ土。ポリッシングペーストFine・Coarseの研磨基剤は、歯面を傷つけにくい丸みを帯びた粒子です。
飛び散りにくく、適度な流動性のあるペースト状。研磨用のCoarse、仕上げ用のFineを組み合わせることで、歯の着色や歯垢を除去し、滑らかに磨き上げます。

医療機器届出番号	
Fine	27B2X00325000005
Coarse	27B2X00325000006

ポリッシングペースト Fine ポリッシングペースト Coarse

2025 年 6 月作成 (第 1 版) の製品電子添文に基づき作成

禁忌・禁止		保管方法及び有効期間等						
本材又は本材に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎、腫脹、かゆみ等の過敏症状の既往歴のある患者には使用しないこと。		<保管方法> 1) 高温多湿及び直射日光を避け、室温(1℃～30℃)で保管すること。 2) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。 <有効期間> 外箱に表示 [記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。]						
形状・構造及び原理等		製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等						
<table><tr><th>形 状</th><th>成 分</th></tr><tr><td>Fine : 黄色 ペースト状</td><td rowspan="2">ケイソウ土、フッ化ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、ソルビトール、プロピレングリコール、クエン酸水和物、サッカリンナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸エステル、着色料、香料、精製水</td></tr><tr><td>Coarse : 青緑色 ペースト状</td></tr></table>		形 状	成 分	Fine : 黄色 ペースト状	ケイソウ土、フッ化ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、ソルビトール、プロピレングリコール、クエン酸水和物、サッカリンナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸エステル、着色料、香料、精製水	Coarse : 青緑色 ペースト状	〔製造販売元〕 株式会社ビーブランド・メディコーデンタル 住所：大阪府大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号 TEL：06-6370-4182 FAX：06-6370-4184	
形 状	成 分							
Fine : 黄色 ペースト状	ケイソウ土、フッ化ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、ソルビトール、プロピレングリコール、クエン酸水和物、サッカリンナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸エステル、着色料、香料、精製水							
Coarse : 青緑色 ペースト状								
原理：研磨成分(ケイソウ土)により、歯面を物理的に清掃研磨する。		GS1 コード (個包装)						
使用目的又は効果		Fine  (01)04987463220601 Coarse  (01)04987463220700						
使用方法等								
本材の適量をブラシ又はカップ等に取り、歯面を清掃又は研磨する。 処理後、口腔内を洗浄し本材を除去する。 <使用方法に関連する使用上の注意>		参考医院価格(税別)：1,300円 / 本 容量：35g						
1) ハンドピースは、高速回転で使用すると研磨材が飛び散ることがあるので、低速回転(1500rpm 以下)で使用する。		<重要な基本的注意>						
2) ハンドピースは、メーカーの指示に従って使用すること。		1) 本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診療を受けさせるなど適切な処置を行うこと。						
3) 本材を使用して歯面を清掃又は研磨する際には、眼に入るのを防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。		2) 本材の使用時は、眼の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。						
4) 本材を使用して歯面を清掃又は研磨する際は、衣服等への飛散を防ぐために患者にエプロン等を使用すること。		3) 本材が眼に入った場合は、すぐに水で十分に洗浄し、眼科医の診療を受けさせるなど適切な処置を行うこと。						
5) 歯面の汚れがひどい場合は、あらかじめスクレーパーや粗研磨用歯面研磨材等で除去してから使用すること。		4) 本材は乾燥すると残渣が落ちにくい場合があるので、使用後は速やかに洗浄すること。						
使用上の注意								

■ お取引材料店名

製造販売元 資料請求先

Bee (株)ビーブランド・メディコーデンタル
本社：大阪市東淀川区西淡路 5-20-19 TEL: 06-6370-4182 FAX: 06-6370-4184

問い合わせ先 ☎ 03-3295-6926
土・日・祝日を除く 9:00 ~ 12:00
13:00 ~ 17:00

弊社ホームページはこちら



<https://bee.co.jp/>