

医療機器届出番号	
Fine	27B2X00325000005
Coarse	27B2X00325000006

新発売

New

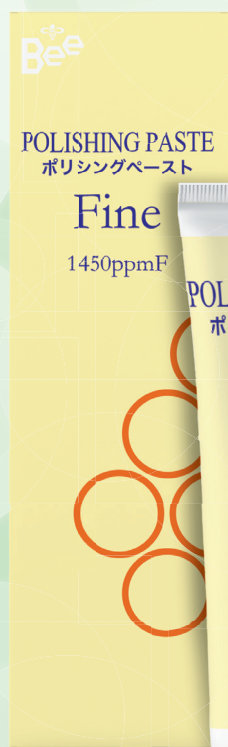
ポリッシングペースト

POLISHING PASTE

ファイン

FinePMTC用として
仕上げ用に

コース

CoarsePMTC用として
研磨用に

フルーツミックスミントフレーバー

- ◎フッ素として1450ppm配合です。
- ◎ラミネートチューブ入りのため乾燥しにくく、必要量だけ取り出せます。
- ◎スクレーリング、ルートプレーニング後の歯面研磨に。
- ◎歯冠部の着色除去に。

製品名	ポリッシングペースト Fine
フッ素濃度	1450ppm
香り	フルーツミックスミント
容量	35g

製品名	ポリッシングペースト Coarse
フッ素濃度	1450ppm
香り	フルーツミックスミント
容量	35g

研磨基剤はケイソウ土。ポリッシングペーストFine・Coarseの研磨基剤は、歯面を傷つけにくい丸みを帯びた粒子です。

飛び散りにくく、適度な流動性のあるペースト状。研磨用のCoarse、仕上げ用のFineを組み合わせることで、歯の着色や歯垢を除去し、滑らかに磨き上げます。

医療機器届出番号	
Fine	27B2X00325000005
Coarse	27B2X00325000006

ポリッシングペースト Fine ポリッシングペースト Coarse

2025年6月作成(第1版)の製品電子添文に基づき作成

禁忌・禁止	保管方法及び有効期間等						
<p>本材又は本材に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎、腫脹、かゆみ等の過敏症状の既往歴のある患者には使用しないこと。</p>	<p><保管方法></p> <ol style="list-style-type: none">1) 高温多湿及び直射日光を避け、室温(1℃～30℃)で保管すること。2) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。 <p><有効期間></p> <p>外箱に表示</p> <p>[記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。]</p>						
形状・構造及び原理等	製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等						
<table border="1"><thead><tr><th>形状</th><th>成分</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fine : 黄色 ペースト状</td><td>ケイソウ土、フッ化ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、ソルビトール、プロピレングリコール、クエン酸水和物、サッカリンナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸エステル、着色料、香料、精製水</td></tr><tr><td>Coarse : 青緑色 ペースト状</td><td></td></tr></tbody></table> <p>原理：研磨成分(ケイソウ土)により、歯面を物理的に清掃研磨する。</p>	形状	成分	Fine : 黄色 ペースト状	ケイソウ土、フッ化ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、ソルビトール、プロピレングリコール、クエン酸水和物、サッカリンナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸エステル、着色料、香料、精製水	Coarse : 青緑色 ペースト状		<p>[製造販売元]</p> <p>株式会社ビーブランド・メディコーデンタル</p> <p>住所：大阪府大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号</p> <p>TEL：06-6370-4182 FAX：06-6370-4184</p>
形状	成分						
Fine : 黄色 ペースト状	ケイソウ土、フッ化ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、ソルビトール、プロピレングリコール、クエン酸水和物、サッカリンナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸エステル、着色料、香料、精製水						
Coarse : 青緑色 ペースト状							
使用目的又は効果	GS1 コード (個包装)						
<p>歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。</p>	<p>Fine  (01)04987463220601</p> <p>Coarse  (01)04987463220700</p>						
使用方法等	 <p>容量：35g</p>						
使用上の注意							
<p><重要な基本的注意></p> <ol style="list-style-type: none">1) 本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診療を受けさせるなど適切な処置を行うこと。2) 本材の使用時は、眼の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。3) 本材が眼に入った場合は、すぐに水で十分に洗浄し、眼科医の診療を受けさせるなど適切な処置を行うこと。4) 本材は乾燥すると残渣が落ちにくい場合があるので、使用後は速やかに洗浄すること。							

- その他、詳細は製品電子添文をご参照ください。
- 製品電子添文の改訂に十分ご留意ください。

■ お取引材料店名

製造販売元 資料請求先

 (株)ビーブランド・メディコーデンタル

本社：大阪市東淀川区西淡路5-20-19 TEL: 06-6370-4182 FAX: 06-6370-4184

問い合わせ先 ☎ 03-3295-6926

土・日・祝日を除く 9:00～12:00
13:00～17:00

弊社ホームページはこちら



<https://bee.co.jp/>